

1. 38도씨가 넘지 않는 물로 핸드피스 외부표면 닦기

* 초음파세척기 사용 절대금지!

2. 소독이 된 부드러운 형겔으로 외부표면 닦기

* 물이나 알코올, 소독제 등에 절대 핸드피스를 담구지 마세요!



3. 각 핸드피스에 맞는 오일 노즐을 스프레이 오일 입구에 장착하고, 오일을 흔들어 주세요



4. 스프레이 오일캔을 똑바로 들고, 노즐을 핸드피스 몸통하단에 넣습니다. 핸드피스 헤드를 형겔이나 휴지로 막고, 헤드 쪽으로 더러운 잔여물과 함께 오일이 흘러나 오도록 충분히 스프레이오일을 분사해줍니다.

* 더러운 이물질/잔여물 없이 맑은 오일이 흘러나올때까지 반복해서 오일링을 해 주세요



5. 오일 노즐을 헤드입구 쪽으로 향하게 해서 1~2초간 오일을 분사해줍니다.

핸드피스 고장의 주 원인은 헤드카트리지의 척 기능 손상입니다(버 고정 안됨 현

상). 척 기능 손상을 피하려면, 주기적으로 헤드입구(버 삽입구)에 오일링을 직접 해줌으로써 콜렛 척이 원활될 수 있도록 합니다.



6. 핸드피스를 외부표면에 묻은 잔여오일들을 깨끗이 닦은 후, 핸드피스를 오토클레이브 전용 용기(BA엘로우 튜브)나 멸균종이파우치에 넣어 밀봉해줍니다.




7. 핸드피스를 오토클레이브 기계에 넣고 싸이클 선택 및 오토클레이브를 작동시켜 줍니다.

*** 진공오토클레이브 기계가 아닌 경우에는 드라이(Dry) 싸이클을 선택하지 않습니다.**

선택한 싸이클이 끝난 후에는 핸드피스를 기계 밖으로 꺼내줍니다.
(핸드피스를 오랫동안 오토클레이브 기계 안에 방치해두시 마세요)

*** 커플링은 오토클레이브 절대 금지**

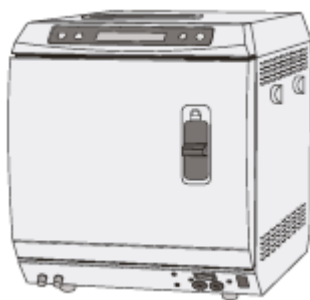

정리: 적절한 옷차림 및 관리도구 준비 → 외부 세척 → 내부 오염물질 제거 → 원활작업 단계 → 살균소독(오토클레이브) 단계 → 적절한 보관

주기적으로 위 관리 단계를 순차적으로 잘 이행한다면, 핸드피스의 수명이 훨씬 더 늘어 납니다.